

# AUSKARŲ VĒRIMO VADOVAS

**Caflon Blu – auskarų vėrimo sistema  
panaudojant vienkartinės kasetes**



OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE: UAB Vitrina (VITRINA PRO)  
Tel: 8 685 64579, el.paštas: info@vitrinapro.lt  
[www.caflon.lt](http://www.caflon.lt)



## Auskarų vėrimo įrangos gamintojas ir platintojas

Šiame vadove bus nagrinėjamos šios auskarų vėrimo temos:

Informacija apie Caflon

Caflon auskarai

Ausies anatomija: kaip pasirinkti ausies dūrimo vietą

Auskarų vėrimo kontraindikacijos

Auskarų vėrimo procedūra (žingsnis po žingsnio), naudojant Caflon Blu sistemą

Tolesnė priežiūra

Potencialios problemos ir papildoma informacija

## Ižanga

Sveikiname paėmus Caflon Blu auskarų vėrimo vadovą. Šio leidinio tikslas suteikti skaitytojui aiškią ir tikslią informaciją apie tai kaip įverti auskarus klientams naudojant Caflon Blu auskarų vėrimo sistemą.

Caflon auskarų vėrimo sistema yra saugi ir leidžianti pelningai teikti paslaugą. Šiai sistemai nereikia didelių finansinių investicijų, ji neužima daug vietos ir procedūros atliekamos labai greitai. Pelnų marža yra tikrai gera, todėl Caflon auskarų vėrimo sistema yra protinga ir saugi investicija.

# Skaitykite toliau...



**CAFLON****CAFLON**

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi kompanija gamina ir platina aukštos kokybės auskarų vėrimo įrangą bei alergijos nesukeliantį madingus auskarus.

**CAFLON**

Viena iš didžiausių pasaulyje auskarų vėrimo įrangos gamintoja ir platintoja. Kompanijos produktai parduodami daugiau nei 100 šalių.

**CAFLON**

Caflon auskarų kolekcija apima visas madingiausias formas ir akmenis. Gamybos tikslumą užtikrina šveicariška įranga.

**CAFLON**

Caflon siūlo platų spektrą pagalbinių priemonių organizuojat marketingą ir pardavimus. Taip pat ausų priežiūros sprendimus, antiseptines servetėles bei specialius rinkinius skirtus auskarų vėrimo pradedantiesiems.



## Siūlomų auskarų spektras

- ✿ Caflon auskarai gaminami iš alergijos ir odos sudirgimo nesukeliančių medžiagų.
- ✿ Siūloma daug skirtingų stilių, dydžių ir medžiagų tokių kaip auksas, titanas, paausuotas ar pasidarbuotas metalas.
- ✿ Visi auskarai pateikiami iš anksto sterilizuotuose lizdiniuose paketuose, panaudojant „Etileno oksido“ dujas ir specialų popierių.
- ✿ Atskirai sterilizuojama kiekviena auskarų pora.
- ✿ Gaminiai atitinka Europos nikelio direktyvą 94/27/EC

## Išorinė ausis

### Kokią ausies vietą galima pradurti su Caflon Blu


- ✿ Ausies spenelis yra minkšta ausies vieta, kurią sudaro oda dengianti riebalinį audinį. Šią ausies vietą galima pradurti. Gijimo laikas yra apie 4-6 savaitės.
- ✿ Kremzlinę ausies dalį sudaro elastingas audinys dengiamas odos ir mažų plaukelių. Pradurti galima plokščią viršutinę kremzlinio ploto dalį kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Svarbu paaiškinti klientui, kad su Caflon Blu sistema galima saugiai pradurti šį plotą, tačiau duriant šioje vietoje būtina papildoma priežiūra. Gijimo laikas – mažiausiai 12 savaičių.
- ✿ Caflon Blu ausų vėrimo sistema nėra skirta verti auskarus kitose kūno dalyse, su ja galima durti tik tas ausies vietas, kurios yra užbrūkšniuotos paveikslėlyje.

### Išorinės ausies anatomija ►

Ausies kaušelis

Išorinė ausies landa

Ausies spenelis

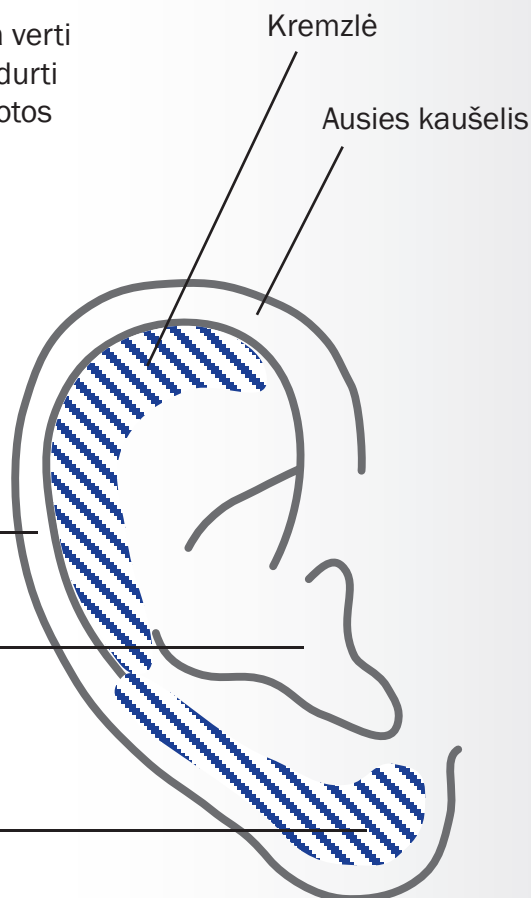

## Ausų vėrimo kontraindikacijos

- ✿ Ausų vėrimo kontraindikacijos tai būklės reiškiančios, kad klientas yra labiau linkęs gauti infekciją, lėčiau gyti nuo galimos infekcijos, susižeisti ar kitaip kliudyti procesui.

**Jei klientas pasižymi kuria nors iš išvardintų būklių, prieš veriant auskarus reikėtų pasikonsultuoti su daktaru:**

Kraujo cirkuliacijos sutrikimai

Aukštas arba žemas kraujo spaudimas

Buvusi trombozė ar embolija

Epilepsija (Jei epileptikas nori durtis ausis, jį turi lydėti kitas asmuo)

Nėštumas

Diabetas

Nervų sistemos sutrikimai

Odos susirgimai

Mėlynės, nesenas kraujavimas ar patinimas

Odos randai

Karpos ar apgamai (galima durti per strazdanas)

Įpjovimai, įbrėžimai ar nesenos operacijos

**Jei abejojate, auskarų neverkite**


## Įranga

Norėdami verti auskarus su Caflon Blu sistema jums reikės susipažinti su įranga, kurią teks naudoti t.y. auskarų vėrimo instrumentu, auskarais, vienkartinio naudojimo segtuko laikikliu/ausies apsauga ir auskaro laikikliu bei lizdiniu paketu.

Segtuko laikiklis/ausies apsauga ir auskaro laikiklis (daugiau sekančiame puslapyje) neįeina į komplektą su instrumentu. Šie elementai yra steriliai įpakuoti kartu su auskarais ir segtukais lizdiniame pakete.

**SVARBU!** Niekada nenaudokite to paties segtuko laikiklio/ausies apsaugos ir auskaro laikiklio daugiau nei vienam klientui.

### Caflon Blu instrumentas ▼

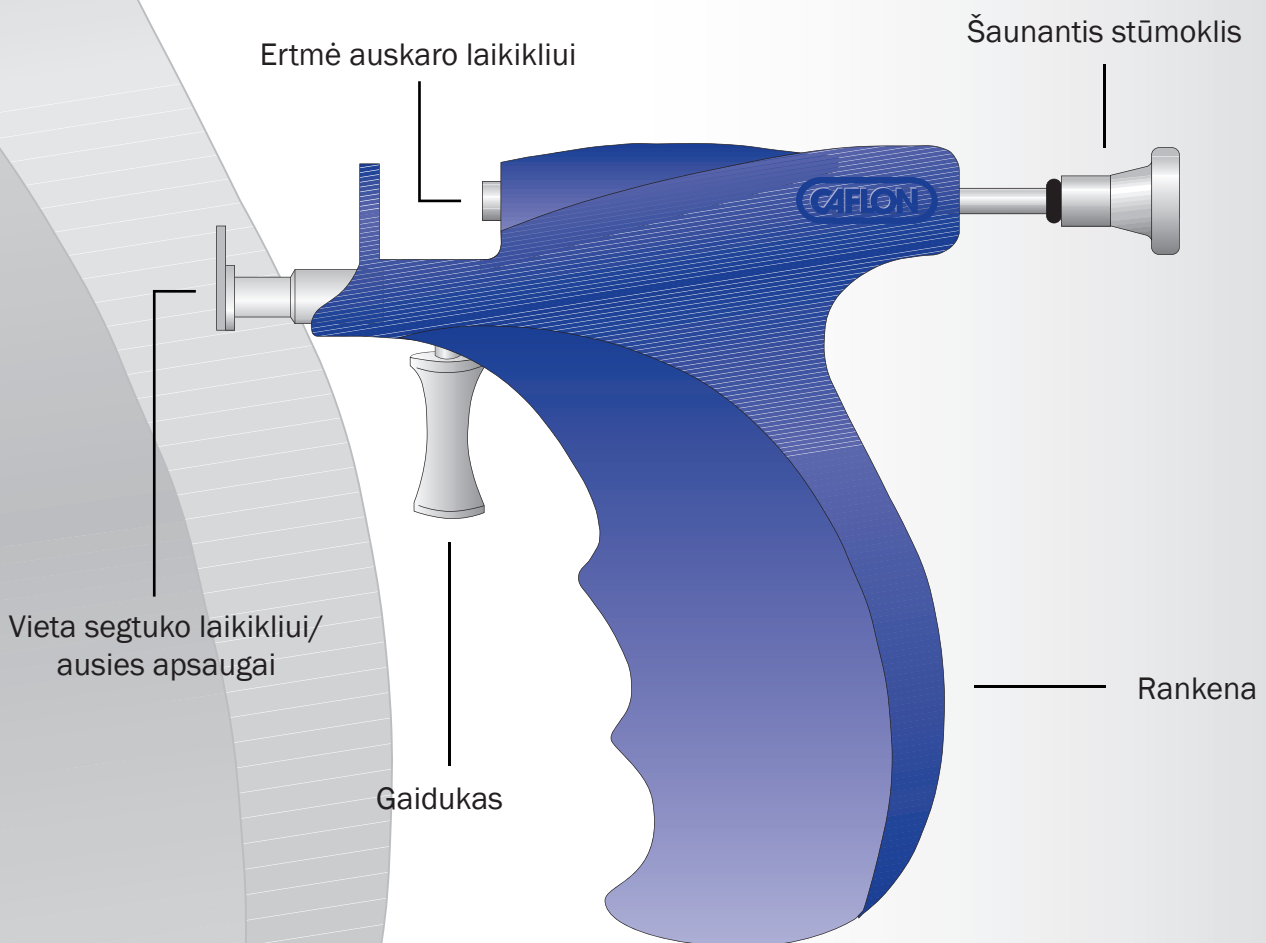




## Lizdinio paketo turinys


Segtukas ▼



Segtuko laikiklis/ausies  
apsauga ▼

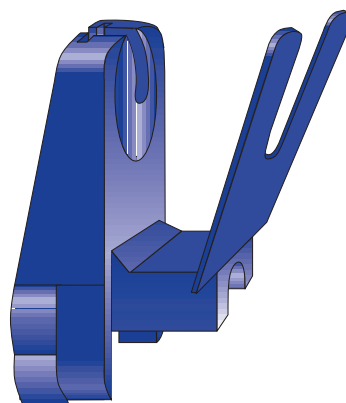


Auskaras ▼

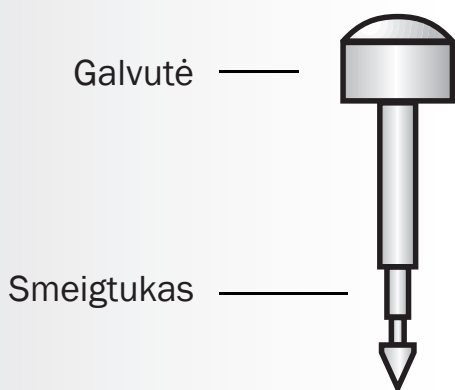


Auskaro laikiklis ▼

Mini dydis (Mėlynas)


Įprastas dydis (Baltas)

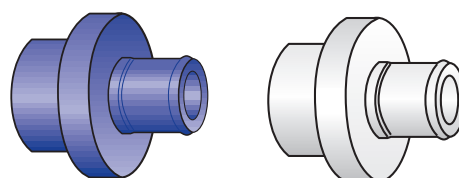

Įrankis auskaro laikiklio  
nuėmimui ▼

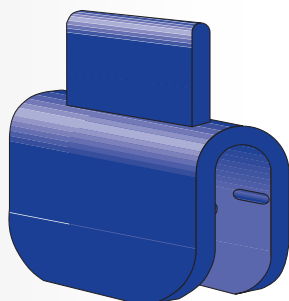

Mėlynas plastikinis  
paketas ▼

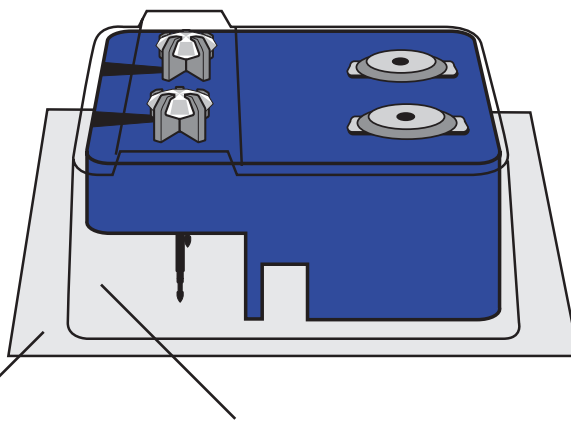

Apsauginis popierius

Plastikinė lizdinė pakuotė

(Paketo viduje rasite segtuko laikiklį/  
ausies apsaugą ir auskaro laikiklį.)

# Auskarų vėrimas

(žingsnis po žingsnio)


## Pasiruošimai procedūrai ir kliento supažindinimas su procedūra

- ✿ Paprastai klientus galima suskirstyti į dvi grupes: „nerimaujančius“ ir „ramius“. Aki-vaizdu, kad sunkiau dirbti su „nerimaujančiais“ klientais. Tačiau didžiąją dalį nerimo sukelia mintys, kad auskarų vėrimas gali būti skausmingas. Galbūt anksčiau jie patyrė skausmingą ausų dūrimo procedūrą. Šiuos klientus reikia nuraminti patikinant, kad Caflon Blu sistema yra visiškai neskausminga.
- ✿ Pasodinkite klientą ant kėdės taip, kad aukštis būtų tinkamas atlikti procedūrą. Pasisitenkite, kad jums nereikėtų stiebtis ar lenktis žemyn norint pradurti kliento ausį.
- ✿ Paprašykite kliento pasirinkti auskaro modelį iš Caflon pavyzdžių paletės.
- ✿ Paaiškinkite procedūrą ir duokite klientui perskaityti bei pasirašyti auskarų vėrimo prašymą bei tolesnės priežiūros instrukcijas.
- ✿ Patikrinkite ar nėra jokių kontraindikacijų. Jei nekyla abejonių galite pradėti procedūrą.
- ✿ Dabar kruopščiai nusiplaukite rankas arba nuvalykite jas su medicininiu rankų valikliu chlorheksidino pagrindu. Nusišluostykite rankas ir kaip papildomą apsaugos priemonę galite užsidėti vienkartinės pirštines.
- ✿ Jei klientas jau turi įsivėręs auskarus, paprašykite kliento juos laikinai nusiimti.
- ✿ Jei kliento ausis dengia plaukai, patraukite juos ir prisekite segtuku.
- ✿ Patikrinkite ar ant kliento ausų nėra plokščialąstelių cistų t.y. odos audiniu apgaubtų organizmui nereikalingų medžiagų. Jei apčiuopus kliento ausį jaučiate mažą, kietą gumbelį, kurį galima pajudinti, tai yra plokščialąstelinė cista. Jei apčiuopiate ir matote gumbelį, kurio neišeina pajudinti, reiškia tai randas. Cistos yra nematomos ir gali būti pajudinamos, randai yra matomi, bet nepajudinami. Niekada neverkite auskaro per cistą, nes ją pradūrus į audinius patenka joje susikaupusios nereikalingos medžiagos, kurios gali sukelti infekciją. Taip pat niekada nedurkite tiesiai į keloidinius randus, kurie yra dideli, matomi randiniai gumbai.  
*Taisyklė yra tokia: Jei matote keloidinį ar kitokį randą durkite 3-4 mm nuo jo. Jei randate jau pradurtą skylutę, auskarą verkite 1 cm nuo jos.*  
Tai reikalinga tam, kad netiksliai pradūrus ausies spenelyje neatsirastų viena didelė skylė, o taip pat padeda išvengti atskirų auskarų segtukų persidengimo.

- ✿ Galite durti ir per seną skylutę, jei ant jos nėra didelio rando.
- ✿ Nuodugniai apžiūrėję ausį, nuvalykite plotą į kurį versite auskarą iš abiejų pusių naudodami antiseptine servetėlę. Kiekvienai ausiai naudokite atskirą servetėlę. Tai apsaugos nuo infekcijos pavojaus.
- ✿ Palaukite 2 minutes kol priemonė įsigers ir ausis pilnai nudžius.
- ✿ Tuo metu galite pademonstruoti klientui instrumento garsą, kuris pasigirsta dūrimo metu. Kai klientas žino šį garsą, jis neišsigąs ir nesujudės atliekant procedūrą, taip sumažės netikslaus dūrio tikimybė.  
Norėdami pademonstruoti garsą:
  - Paimkite instrumentą į bet kurią ranką.
  - Atitraukite stūmoklį kol šis užsifiksuos.
  - Pridėkite instrumentą prie kliento ausies.
  - Pasakykite, kad jis tuoj išgirs garsą, kurį sukelia instrumentas.
  - Paspauskite gaiduką ir instrumentas iššaus.
- ✿ Kai antiseptinis losjonas išdžius, pažymėkite vietą į kurią dursite su netoksišku, tam tikslui skirtu rašikliu. Kitokio rašiklio naudoti negalima.
- ✿ Pasitelkę veidrodį, parodykite klientui tašką pažymėtą ant ausies.
- ✿ Tęskite procedūrą, tik tada kai klientas patvirtins, kad vieta pažymėta teisingai.
- ✿ Jei klientas pasakys, kad nori pakoreguoti vietą, nuvalykite pažymėtą tašką ir pakartokite prieš tai aprašytą žymėjimo procesą.
- ✿ Durkite ausį tik tada kai klientas bus patenkintas pažymėta vieta.

## Įrangos paruošimas



- ✿ Lizdinę pakuotę reikia atidaryti ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
- ✿ Pirmiausia nuo viso paketo atplėškite auskarų porą. Plėškite pagal pažymėtą liniją.
- ✿ Paimkite ir apsukite paketą taip, kad apsauginis pakuotės popierius būtų viršuje, o plastikas padėtas ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
- ✿ Viename pakuotės kampe rasite išlinkimą nuo kurio reikia pradėti plėšti popierių nuo plastiko.
- ✿ Laikykite paketą arti stalo paviršiaus ir lėtai atplėškite apsauginį popierių, darykite tai atsargiai, kad mėlynas segtuko laikiklis/ausies apsauga ir auskaro laikiklis neiškristų ant stalo ar grindų. Jei taip atsitiktų lizdinę pakuotę reikia išmesti ir paimti naują. Taip užtikrinamas visiškas sterilumas.
- ✿ Tada užtaisykite instrumentą, atitraukdami šaunantį stūmoklį atgal kol jis užsifiksuos. Su pirštinėmis ant abiejų rankų, paimkite mažą apvalų mėlyną (Mini) arba baltą (Normalų) auskaro laikiklį iš pakuotės ir įstatykite jį į tam skirtą ertmę instrumente (žiūrėkite pav. 1).
- ✿ Paimkite instrumentą į vieną ranką, o mėlyną segtuko laikiklį/ausies apsaugą į kitą ir ją tvirtai ir iki galo uždėkite į jai skirtą vietą ant instrumento, lanksti ausies apsauga turi žiūrėti į viršų ir į vidų (žiūrėkite pav. 1).
- ✿ Padėkite instrumentą ant švaraus paviršiaus.

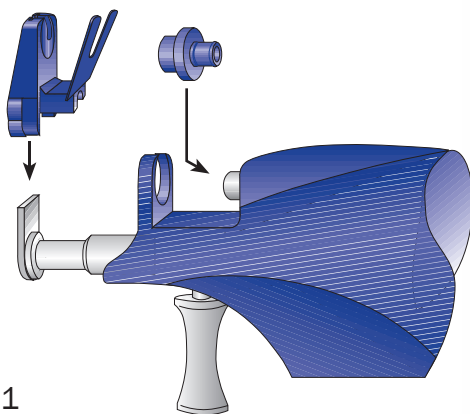

pav. 1

- ✿ Paimkite skaidrų lizdinį paketą, kuriame yra mėlynas laikiklis su auskarais ir jų segtukais. Atplėškite paketą ir atsargiai išimkite mėlyną laikiklį, neliesdami sterilių auskarų ir segtukų.
- ✿ Laikykite mėlyną laikiklį už šonų, auskarai ir segtukai turi būti atsukti į viršų.
- ✿ Paimkite instrumentą į vieną ranką, o mėlyną laikiklį į kitą ir įstatykite išlindusią auskaro galvutę į apvalų plastmasinį auskarų laikiklį, kurį prieš tai įstatėte į ertmę instrumente, tada pasukite ir patraukite į viršų mėlyną laikiklį, auskaras liks instrumente, o laikiklį ištrauksite (žiūrėkite pav. 2).
- ✿ Laikykite instrumentą lygiai ir pridėję mėlyną laikiklį su segtuku, įstatykite jį į segtuko laikiklį/ausies apsaugą, kurią prieš tai uždėjote ant instrumento (žiūrėkite pav. 3).
- ✿ Mėlyną laikiklį su likusiu auskaru ir segtuku pastatykite vertikaliai ant švaraus paviršiaus, kad jį būtų galima iš karto naudoti sekančiam auskaro vėrimui jei to reikės.
- ✿ Instrumentas užtaisytas ir jau galite verti auskarą. Tęskite procedūrą laikydamiesi instrukcijų pateiktų sekančiame puslapyje.
- ✿ Kai baigsite pirmą vėrimą, pakartokite viršuje aprašytą procesą antram vėrimui.

Šias dvi operacijas yra labai lengva atlikti, tačiau gali reikėti keletą kartų pasitreniruoti kol įgusite. Prisiminkite, kad užtaisius prietaisą, jį visada laikykite horizontaliai, kad neiškristų auskaras ar segtukas.

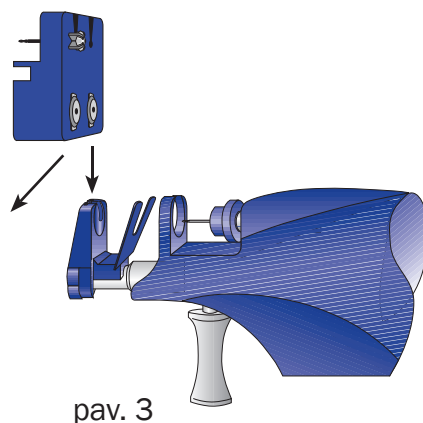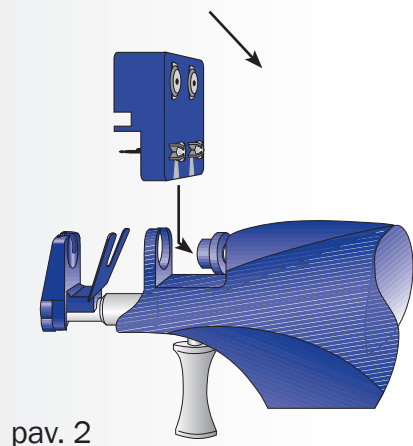

# Auskaro vėrimas

## Vėrimas į ausies spenelį

- ✿ Užtaisytą instrumentą pridėkite prie kliento ausies taip, kad ausies spenelis atsidurtų tarp segtuko ir lanksčios ausies apsaugos (žiūrėkite pav. 5). Jei dursite kremzlinį plotą, žiūrėkite į sekančiame puslapyje pateiktą instrukciją.
- ✿ Instrumentas turi būti nutaikytas tiesiai ir statmenai į ausį, kitaip pradursite kampu.
- ✿ Švelniai paspauskite gaiduką iki pusės kol pasieksite stūmoklio paleidimo tašką. Auskaro smailas galiukas priartės prie ausies. Patikrinkite ar gerai nusitaikėte (Auskaro smeigtukas turi būti nukreiptas tiesiai į jūsų pažymėtą vietą).
- ✿ Kai būsite tikri, kad viskas tvarkoje, paprašykite kliento sėdėti ramiai. Paspauskite gaiduką toliau kol auskaras iššaus ir pravers ausį.
- ✿ Ramiai laikykite instrumentą ir nuspaustą gaiduką apie 2 sekundes.
- ✿ Lėtai atleiskite gaiduką ir atsargiai patraukite instrumentą žemyn. Netraukite jo į šalį nuo ausies (žiūrėkite pav. 6).
- ✿ Užtaisykite instrumentą dar karta ir pakartodami aprašytą procedūrą atlikite antrą vėrimą.
- ✿ Paklauskite kliento ar jis gerai jaučiasi ir gali atsistoti ar jiems reikėtų dar šiek tiek laiko. Jei klientas atsistoja ir jaučiasi apsvaigęs, padėkite jam atsisėsti ir leiskite pabūti 3-5 minutes prieš išeinant.
- ✿ Patarkite klientui kaip reikės toliau prižiūrėti ausis.
- ✿ Baigus procedūrą, nuvalykite instrumentą dezinfekavimui skirtu alkoholiu ar specialiu valikliu.

## *Vienkartinio auskaro laikiklio ir segtuko laikiklio/ausies apsaugos pašalinimas nuo instrumento*



- ✿ Norėdami nuimti segtuko laikiklį/ausies apsaugą, paprasčiausiai ją numaukite nuo instrumento ir išmeskite į atliekų dėžę.
- ✿ Norėdami išimti apvalų auskaro laikiklį, uždėkite tam skirtą įrankį ant stūmoklio (žiūrėkite pav. 7). Tada, atitraukite stūmoklį iki galo kol jis užsifiksuos ir auskaro laikiklis atsilaisvins. Paimkite auskaro laikiklį ir jo nuėmimui skirtą įrankį. Dabar instrumentas yra užtaisytas, todėl paspauskite gaiduką, kad jis iššautų. Saugokite pirštus, kad jie nepatektų į stūmoklio takelį.

### Auskaro vėrimas į kremzlinį ausies plotą

Veriant auskarą į kremzlinį plotą, reikia laikytis ypatingų atsargumo priemonių, o atlikus procedūrą reikalinga speciali priežiūra.

- ✿ Veriant auskarą į kremzlinę ausies dalį, durkite tik plokščią, viršutinį plotą. Niekada nedurkite per užriestą kremzlinio ploto kraštą arba per arti krašto, kad ausis neįplyštų. Taip pat niekada nedurkite per randą bei venkite matomų kapiliarų.
- ✿ Paruoškite dūrimo plotą kaip aprašyta pirmoje instrukcijoje.
- ✿ Paprašykite kliento atlošti galvą ir žiūrėti į viršų. Tokia padėtis leidžia lengviau nusitaikyti, išlaikant instrumentą horizontalioje padėtyje, kad neiškristų auskarų segtukas.
- ✿ Jei kliento kremzlinė ausies dalis yra labai stora ar stipriai užriesta, jūs turite ją patempti ir ištiesinti. Tai leis tiksliau nutaikyti instrumentą. Kai instrumentas yra tinkamoje padėtyje ir paruoštas dūrimui, laikykitės tų pačių nurodymų kaip ir veriant auskarą į ausies spenelį.
- ✿ Jei reikia, pakartokite procedūrą kitai ausiai.

**SVARBU!** Perspėkite klientą, kad kremzlinės dalies gijimo laikas gali trukti iki 12 savaičių. Šiai vietai taip pat reikalinga ypatinga priežiūra. Jei skausmas, paraudimas ar patinimas tęstųsi ilgiau, klientas turi kreiptis į medikus. To nepadarius galima visam laikui pažeisti ausį.

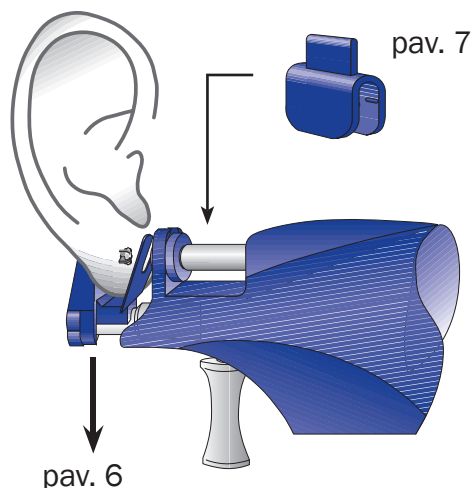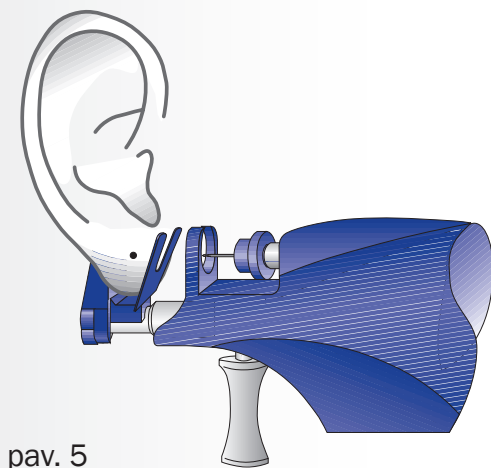

## Priežiūra po procedūros

Jei veriant auskarus griežtai laikomasi šiame vadove pateiktų instrukcijų, potencialių problemų kylančių po procedūros rizika sumažėja iki minimumo. Tačiau bet kuriuo atveju svarbu laikytis tolesnės priežiūros taisyklių.

Klientui reikėtų pateikti sekančius patarimus.

### *Siekiant išvengti infekcijos*

- ✿ Nežaiskite su ausimis, venkite liesti ausis bei auskarus rankomis.
- ✿ Nepakeiskite įvertų auskarų kitais kol nepraėjo gijimo laikotarpis (6 savaitės – ausies speneliui; 12 savaitių – kremzlinei daliai).
- ✿ Prieš liečiant ausis ar auskarus nusiplaukite rankas. Pradurtas vietas pravalykite du kartus per dieną neišimdami auskarų ir naudodami Caflon ausų priežiūros tirpalą. Valykite ausies plotą iš abiejų pusių.
- ✿ Bent kartą per dieną pasukite auskarus į vieną ir kitą pusę. Darykite tai švariam rankomis.
- ✿ Pasistenkite, kad prausiantis muilas ar šampūnas nesikauptų prie auskaro ar segtuko. Po prausimosi pravalykite auskarų vietas su Caflon ausų priežiūros tirpalu.
- ✿ Visada išskyrus valant pradurtos vietos turėtų būti sausos.
- ✿ Naudojant kvepalus, dezodorantą ar plaukų laką, pridenkite ausis.
- ✿ Neprispauskite auskaro segtuko prie ausies. Segtukas visada turi būti ant auskaro smeigtuko galo.
- ✿ Nedidelis skausmas/paraudimas gali atsirasti iš karto po procedūros – tai yra normalu. Jei klientas tiksliai laikysis priežiūros reikalavimų minėti simptomai turi praeiti per 48 val. Jei skausmas ar patinimas tęsiasi ilgiau arba yra labai stiprus reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Auskarų nereikėtų išimti, kol to nerekomenduos padaryti gydytojas.



### *Kaip apsaugoti pradurtą vietą nuo užsitraukimo*

- ✿ Neišimkite auskarų mažiausiai gijimo laikotarpiu (4-6 savaitės – ausies speneliui; 12 savaičių – kremzlinei daliai).

### *Jei atsiranda infekcija ar sudirgimas*

Jei atsiranda per didelis paraudimas, sudirgimas, niežėjimas ar skausmas reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Auskarų nereikėtų išimti, kol to nerekomenduos padaryti gydytojas.

### *Pagrindinės taisyklės*

- ✿ Auskarą galima išimti po 4-6 savaičių iš ausies spenelio (po 12 savaičių iš kremzlinės dalies). Tada reikia panešioti kitus smeigtuko tipo auskarus. Jie turi būti padengti 24 karatų auksu arba pagaminti iš nerūdijančio plieno, juos reikia nešioti mažiausiai dar 2 mėnesius. Šiuo laikotarpiu negalima nešioti jokių vielinių auskarų. Nešiojant sunkius auskarus bet kuriuo metu pradurta skylutė gali išsitempti ir atrodyti lyg įplyšimas.
- ✿ Klientui rekomenduokite naudoti Caflon ausų priežiūros tirpalą. Taip būsite tikri, kad klientas naudoja patikimą priemonę.
- ✿ Per pirmuosius metus po auskarų įvėrimo klientas neturėtų išsiimti auskarų ilgiau nei 24 valandom. Tai reikalinga, kad skylutė neužsivertų.
- ✿ Jei klientas tiksliai laikysis šių priežiūros nurodymų, bėgant laikui kiekvienoje ausyje susiformuos maža apvali skylutė, bet ne įplyšimas.

## Potencialios problemos

- ✿ Auskarų vėrimas yra sąlyginai paprasta ir nesudėtinga procedūra, kurią atliekant neiškils jokių problemų jei griežtai laikysitės reikalavimų pateiktų šiame vadove.
- ✿ Laikas per kurį sugyja ausys po auskarų vėrimo labai skiriasi kiekvienu atveju, tačiau vidutiniškai ausies spenelis sugyja per 4-6 savaites, kremzlinė dalis per 12 savaičių.
- ✿ Blogiausia kas gali atsitikti yra tai, kad klientas sujudės tuo metu kai instrumentas iššaus. Tai neišvengiamai lems netikslų ausies pradūrimą.
- ✿ Jei taip atsitiks, neištraukinėkite auskaro nes iš ausies bėgs kraujas. Patarkite palikti auskarą per naktį, tada jį galima ištraukti ir leisti skylutei užgyti.
- ✿ Šis patarimas tinka ir tuo atveju jei klientas nusprendžia jog jam nepatinka įvėrimas, nors jūs viską ir padarėte pagal instrukciją. Patarkite palikti auskarą per naktį, tada jį galima ištraukti ir leisti skylutei užgyti.

## Tolesnė informacija

Jei perskaitėte ir supratote visas instrukcijas pateiktas šiame vadove, jūs turėtumėte sugebėti įverti auskarus naudodami Caflon Blu vienkartinį kasečių sistemą. Tačiau svarbu suprasti ir kitus auskarų vėrimu susijusius klausimus.

## Lietuvoje galiojantis auskarų vėrimo reglamentavimas

Lietuvoje auskarų vėrimo paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225) ir Lietuvos higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“. Pagal šiuos dokumentus papuošalų vėrimui reikalingas leidimas-higienos pasas.

## Amžiaus apribojimai

Lietuvoje draudžiama teikti papuošalų vėrimo paslaugas asmenims iki 18 metų, nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško sutikimo.

Verti auskarus vaikams naudojant Caflon sistemą yra visiškai saugu, tačiau rekomenduojama įspėti tėvus apie reikalingą tolesnę priežiūrą, nes vaikams gali būti sunku jos laikytis patiems. Tėvai turi prisiminti atsakomybę, kad įvėrus auskarus vaikams būtų užtikrinta tinkama priežiūra, o kilus net menkai problemai būtų kreipiamasi į medikus.